



## COMUNICADO 022/2023

### Ref.: Alteração na coleta de secreção nasofaringe para vigilância laboratorial dos vírus de transmissão respiratória.

Para melhoria da vigilância laboratorial da suspeita ou ocorrência de síndrome gripal (SG) ou de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o LACEN/SC orienta o uso dos swabs combinados (nasal/oral). Desta forma, as amostras deverão ser coletadas **com três swabs do tipo rayon: um swab de orofaringe e dois swabs de nasofaringe, sendo um de cada narina** (lembrar que o objetivo do swab é coletar um esfregaço de células e não secreção nasal).

Após a coleta, inserir imediatamente os três swabs em um mesmo tubo de polipropileno contendo 3 ml de meio de transporte viral (MTV). Rosquear a tampa até o final para evitar vazamento e identificar adequadamente o frasco com a etiqueta gerada no sistema GAL. Manter refrigerado entre 2 a 8°C durante todo o armazenamento e transporte (Não congelar). Este material deve chegar ao LACEN em até 48 horas.

As amostras devem ser coletadas por profissional treinado, em conformidade com todas as normas de biossegurança, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados.

Florianópolis (SC), 27 de junho de 2023.

Marlei Pickler Debiasi dos Anjos  
Diretora do LACEN/SC

Gisele Caminha  
Coordenação da Rede de Referência Laboratorial

Red. CRLAB/GC