



## COMUNICADO 031/2024

### Ref.: Atualização do procedimento para realização do exame de Genotipagem do HIV-1

Informamos que, para solicitação de Genotipagem de HIV-1, deverão ser utilizados os tubos com anticoagulante **EDTA K2 ou K3**, tubos de tampa roxa, **sem gel separador**. Estes tubos devem ser adquiridos pela instituição coletora das amostras de sangue.

O exame requer a coleta de 2 (dois) tubos para cada paciente, com no mínimo 3,5 ml de sangue em cada tubo. Os tubos devem ser identificados com nome completo do paciente e a data de nascimento de forma legível.

Após a coleta, as amostras devem ser transportadas a temperatura de 21° a 25°C e entregues em até 48 horas ao LACEN, acompanhados do formulário.

**As amostras não devem ser congeladas.**

Segue o formulário atualizado em duas versões:

#### Preenchimento Digitável:

[https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2016/form-solicitacao\\_geno\\_hiv\\_versao\\_2019- dcc\\_i\\_14062019\\_digitavel.pdf](https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2016/form-solicitacao_geno_hiv_versao_2019- dcc_i_14062019_digitavel.pdf)

#### Preenchimento Manual:

[https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2016/form-solicitacao\\_geno\\_hiv\\_versao\\_2019- dcc\\_i\\_14062019.pdf/view](https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/2016/form-solicitacao_geno_hiv_versao_2019- dcc_i_14062019.pdf/view)

Nessa oportunidade, informamos ainda que as solicitações referentes aos exames de detecção do DNA pró-viral do HIV-1, diagnóstico da infecção pelo HIV-2 e genotipagem do HCV, devem ser encaminhadas ao e-mail [diagnostico@aids.gov.br](mailto:diagnostico@aids.gov.br) para o envio das devidas orientações.

Florianópolis SC, 06 de dezembro de 2024.

Márcio Pacheco de Andrade  
Diretor do LACEN/SUV/SES/SC

Darcita Buerger Rovaris  
Gerente de Biologia Médica